


- 1 Im Notfall Ruhe bewahren!
- 2 Sofort mit der Herzdruckmassage beginnen!
- 3 Defibrillator einschalten und den Anweisungen folgen
- 4 Vorbereiten des Patienten. Verlieren Sie keine Zeit!
- 5 Anweisungen befolgen! Elektroden aufbringen

Opfer und sich selbst aus dem Gefahrenbereich bringen. Person laut ansprechen, an den Schultern rütteln und Atmung kontrollieren.




Wenn keine Reaktion und keine Atmung, Notruf absetzen, Hilfe und Defibrillator holen lassen!

30 x drücken, 2 x beatmen - aber nur, falls trainiert! Ansonsten nur Herzdruckmassage 110 x /Min

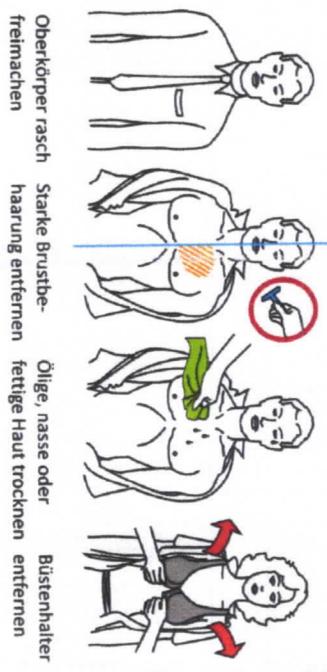


Das notwendige Zubehör befindet sich in der Transporttasche im rückwärtigen Fach!

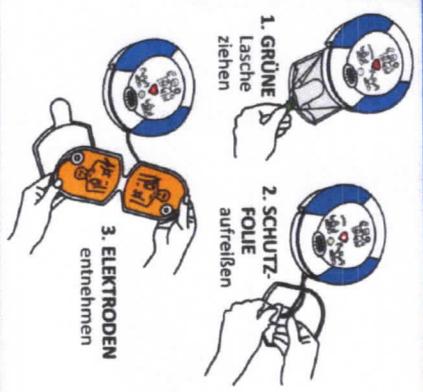

Graue Elektrokassette für Erwachsene und Kinder > 8 J. und > 25 kg


6 Elektroden wie auf der Grafik abgebildet ...

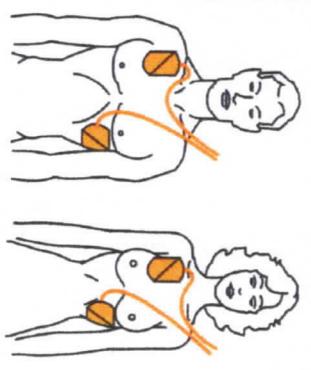

7 Analyse - Patienten nicht berühren




8 Wäh end der Schockabgabe Patienten nicht berühren!

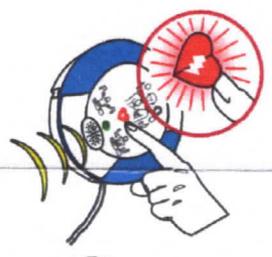

Nach Aufforderung leuchtende Schock-Taste drücken



9 Anschließend mit der Herzdruckmassage fortfahren ...

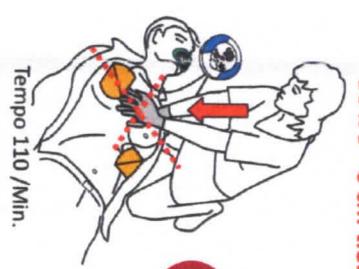

Tempo 110 /Min.



1 Sek. lang Luft in Mund oder Nase blasen

auf die entblößte Brust kleben. Verlieren Sie keine Zeit

! Besuchen Sie unsere YouTube Seite und sehen Sie sich unseren Schulungsfilm an! EW 1 und EW 2

bis der Rettungsdienst eintrifft oder der Patient sich regt. Nur beatmen, falls trainiert

**NOTFALL-
ANWEISUNGEN**

Jeder kann es!



Jeder darf es!

Registrieren Sie Ihren herzschonen Standort kostenfrei auf der CISALI (Citizens Save Lives = Bürger retten Leben) App.

Citizens
SAVE LIVES



Weltweit Defibrillatoren-Standorte und trainierte Ersthelfer finden, inkl. Notruffunktion

MedX5 GmbH & Co. KG - Humboldtstr. 9
D - 86316 Friedberg/Bay. - www.medx5.com

MED X5